

# Kurzanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Nikki, die Krankenpflege-Trainingspuppe mit Auskultationsfunktion, entschieden haben.

Wie möchten Sie starten?

Ich möchte Nikki und das NursingScope mit ihren Standardgeräuschen verwenden.

Nikki ist bei Lieferung praktisch gebrauchsfertig und erfordert nur einen minimalem Einrichtungsaufwand. Wenn Sie die Standard-Auskultationsgeräusche nicht sofort ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a. Schalten Sie das NursingScope ein, indem Sie auf die Plus- oder die Minustaste auf dem Bruststück drücken.
- b. Nach dem Einschalten ertönt die Sprachansage "System activation. Mode one. WiFi initialization failed" (Systemaktivierung. Modus eins. WLAN-Initialisierung fehlgeschlagen)".
- c. Jetzt ist das NursingScope einsatzbereit und Sie können beginnen, Nikki zu auskultieren.



## 2. Ich möchte als Erstes die Standardgeräusche in der Bibliothek ändern.

Wenn Sie die Standard-Herz-, Lungen- und Darmgeräusche ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

### a. Einrichten des Laptops

- Schalten Sie den Acer-Laptop ein. Login: Nikki, Kennwort: 12345
- Klicken Sie auf dem Desktop in der Taskleiste unten rechts auf das Symbol für die WLAN-Verbindung und stellen Sie die Verbindung zu Ihrem lokalen WLAN-Netz her.
- Doppelklicken Sie auf das SimScope Symbol auf dem Desktop.
- Sie werden aufgefordert, das Registrierungsformular auszufüllen. Bitte geben Sie alle Daten ein.

### b. Einrichten des Routers


- Schalten Sie den TP-Link-Router ein, indem Sie ihn über das mitgelieferte USB-Kabel an den Acer-Laptop anschließen oder einfach mit einer Steckdose verbinden. Lassen Sie ihn 1–2 Minuten laufen.
- Verwenden Sie jetzt nicht Ihre lokale Verbindung, sondern stellen Sie eine Verbindung zum TP-Link-Routernetzwerk her. Gehen Sie hierzu auf dem Acer-Desktop zurück zum WLAN-Symbol in der Taskleiste unten rechts und stellen Sie eine Verbindung zum folgenden Netzwerk her:





### c. Einrichten des NursingScope

- Schalten Sie das NursingScope ein, indem Sie auf die Plusoder die Minustaste auf dem Bruststück drücken.
- Nach dem Einschalten ertönt die Sprachansage "System activation. Mode one. Wifi connected" (Systemaktivierung. Modus eins. WLAN-Verbindung hergestellt).
- Achten Sie darauf, dass der Netzwerkname "SimScope\_5G" in der Dropdown-Liste oben links in der Software angezeigt wird.
- Bitte beachten Sie, dass das NursingScope über keinen Ein-/ Aus-Schalter verfügt. Es schaltet sich automatisch aus, sobald die Sitzungszeit verstrichen ist. Die Sitzungszeit kann in den WLAN-Einstellungen der Software geändert werden.

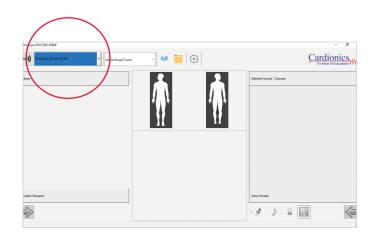

- Bearbeiten Sie die Standard-Auskultationseinstellungen, indem Sie die Geräusche aus der Bibliothek auf der linken Seite auswählen und auf einen Pfeil am unteren Bildschirmrand klicken. Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche "Speichern" zu klicken, die an dem kleinen Diskettensymbol zu erkennen ist.
- Das NursingScope ist jetzt mit den neu zugewiesenen Geräuschen einsatzbereit und Sie können mit der Auskultation beginnen.

### > TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Wenn das NursingScope keine Verbindung herstellen kann, versuchen Sie Folgendes:

### 1. NursingScope – Sitzungszeit

Achten Sie darauf, dass das NursingScope sich nicht zwischenzeitlich abschaltet; die Standard-Sitzungszeit ist auf 4,5 Minuten eingestellt. Schalten Sie es zum Aktivieren ein und drücken Sie das Plus- oder Minuszeichen auf dem Bruststück. Sie sollten dann die Sprachansage "System activation. Mode one" (Systemaktivierung. Modus eins) hören.

### 2. NursingScope - Batterie

Wenn Sie das Plus- bzw. Minuszeichen gedrückt haben und nichts hören, muss die Batterie ausgetauscht werden. Achtung: Die Batterielebensdauer variiert stark je nach Marke und Typ. Verwenden Sie daher bitte nur AAA-Alkali-Batterien. Wir empfehlen die Energizer Ultimate Lithium Batterie, die das NursingScope für bis zu vier Stunden mit Strom versorgt.

#### 3. Router

Überprüfen Sie, ob der Router ordnungsgemäß angeschlossen ist und funktioniert; am Router sollte eine gelbe Anzeige leuchten.

### 4. Netzwerkverbindung

Überprüfen Sie, ob das Routernetzwerk "SimScope\_5G" in der Liste Ihrer verfügbaren Netzwerkverbindungen ausgewählt ist (Taskleiste unten rechts auf dem Desktop).

Wenn Sie immer noch keine Verbindung mit Ihrem NursingScope herstellen können, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsmitarbeiter, um weitere Hilfe einzuholen.



SCANNEN SIE DIESEN QR-CODE, UM MEHR ÜBER NIKKI ZU ERFAHREN UND AUF DIESE KURZANLEITUNG IN IHRER SPRACHE ZUZUGREIFEN.



01/2022