



1019639 | P95

3bscientific.com

Simulateur d'incision du périnée et de sutures

Introduction

Vous avez acheté un simulateur d'incision du périnée et de sutures qui vous permettra de démontrer et de faire faire des exercices de soins professionnels et de fermeture des incisions pratiquées pendant l'accouchement. Ce simulateur possède une garniture génitale qui est pourvue d'une incision faite dans les règles et qui peut ensuite être cousue plusieurs fois. Il est possible de s'y entraîner aux normes (par exemple aux techniques de suture) dans le cadre d'un traitement professionnel des plaies lors de formations de sage-femme et de soignants en néonatalogie et ainsi de s'améliorer.

Articles fournis

Garniture en silicone

Socle

Support



Fonctions

La garniture en silicone de ce simulateur d'incision du périnée permet de faire des coupes personnalisées (par exemple épisiotomie médiane, épisiotomie médiolatérale, épisiotomie latérale). L'anus est continu et permet de palper les structures musculaires au niveau du périnée (M. sphincter ani externus, M. transversus perinei superficialis, M. bulbospongiosus).

Il est en outre possible de simuler des déchirures du vagin et des lèvres et de les traiter en conséquence. Les plaies liées à l'accouchement peuvent être traitées par les techniques de suture usuelles. Les couches musculaires et cutanées peuvent être cousues séparément les unes des autres. La suture peut être effectuée plusieurs fois par coupe. Pour ce faire, il faut d'abord enlever soigneusement le matériau de suture (par exemple avec des ciseaux ou un scalpel et une pincette) avant de pouvoir réaliser une nouvelle suture.



SIMULATEUR D'INCISION DU PÉRINÉE ET DE SUTURES



Montage

Structure du simulateur d'incision du périnée et de sutures

- La garniture en silicone peut être insérée dans le socle en plastique blanc pour garantir sa bonne tenue. Un bombement ponctuel situé au centre du socle permet d'obtenir une béance typique des surfaces d'incisions. Pour une position inclinée personnalisée, on peut utiliser le support pliable fourni. Posez le simulateur par ses pieds en caoutchouc sur une base antidérapante, par exemple une table.
- Le cas échéant, enlevez l'emballage en plastique de la garniture en silicone et mettez celle-ci dans le socle en plastique blanc.
- Écartez les 3 bras du support pliable.
- La surface triangulaire constituée par les 2 bras inférieurs constitue la surface de positionnement du support.
- Rabattez la moitié avant du bras supérieur vers l'arrière jusqu'à ce que vous obteniez une surface d'appui ayant l'angle souhaité.



Figure 1 : Simulateur d'incision du périnée et socle



Figure 2 : Simulateur d'incision du périnée dans socle



Figure 3 : Simulateur d'incision du périnée dans socle avec support



Figure 4 : Simulateur d'incision du périnée dans socle redressé sur support

Nettoyage et entretien

Les surfaces du simulateur peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Avant de le ranger, veillez à ce que l'exerciseur soit complètement sec.

Données techniques

Dimensions :

Simulateur (HxIxP) : 6 x 13 x 21 cm

Ensemble dans sac (HxIxT) : 8 x 25 x 17 cm

Poids : env. 0,8 kg

Conditions de fonctionnement :

Température d'utilisation : -10 °C à +40°C

Température de stockage : -20°C à +60°C

Liste de commande

XP95-001 / 1019640 Garniture de rechange pour simulateur d'incision du périnée

XP95-002 / 1019641 Jeu de garniture de rechange pour simulateur d'incision du périnée (5 exemplaires)

En option :

XP95-003 / 1020767 Kit de suture pour simulateur d'incision du périnée et de sutures (matériau de suture, porte-aiguille, ciseaux, pincette, porte-scalpel, lame)



3B Scientific GmbH • Customer Service Medical
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany
Téléphone : + 49 (0)40-73966-0 • Fa x: + 49 (0)40-
73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 pour manuel d'utilisation et concep-
tion de produit : 3B Scientific GmbH, Allemagne