



W45002 Mannequin de soins avancés aux patients avec pratique de la respiration cardio-pulmonaire (RCP)

Mode d'emploi du Moniteur :

1. Connectez les tubes rouges et bleus aux ports de compression et ventilation à l'arrière du moniteur.
2. Sélectionnez le mode adulte ou enfant, attention avant de changer de mode, pressez à chaque fois reset.
3. Réglez le touche Coach/Reset sur la fonction Coach et tournez le moniteur.

L'étudiant verra alors des lumières de contrôle (Coach) et entendra des sons pour le guider. Les lumières et les sons sont synchronisés. Les sons faibles indiquent le rythme de ventilation, les sons forts indiquent le rythme de compression thoracique. La lumière jaune indique une ventilation trop faible, la rouge une ventilation trop forte. La lumière verte correspond à une ventilation correcte. Les mêmes symboles lumineux sont valables en ce qui concerne la compression thoracique.